



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE

COMITATO PER LA LOTTA ALLE INFEZIONI
OSPEDALIERE

Via Giacomo Cusmano n° 24
90141 - PALERMO

Telefono
091 7032330 - 2060

FAX
091 7032039

EMAIL
direzionesanitaria@ausl6palermo.org

WEB
www.ausl6palermo.org

DATA 06/09/2010
PROT. N° 6258/DSA/CIO
SP

Ai Direttori dei Distretti Ospedalieri
Ai Direttori dei Distretti Sanitari
e, p.c. Ai Direttore Sanitario Aziendale
Ai Responsabile U.O. Qualità

LORO SEDI

Oggetto: Istruzione operativa.

In allegato alla presente si inviano alle SS.LL. le *istruzioni per il reprocessing degli endoscopi/isteroscopi* per la conseguente attuazione.

Il Presidente C.I.O.
Dr. Antonino Di Benedetto



CIO – COMITATO PER LA LOTTA ALLE INFEZIONI OSPEDALIERE

ISTRUZIONE OPERATIVA PER IL REPROCESSING DEGLI ENDOSCOPI/ISTEROSCOPI

PRIORITARIAMENTE: INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI ADEGUATI ALLO SCOPO E SOSTITUIRLI NELLE VARIE FASI DI TRATTAMENTO .

PRETRATTAMENTO

- AL TERMINE DELL' ESAME ENDOSCOPICO PROCEDERE ALL'ASPIRAZIONE ED INSUFFLAZIONE, ALTERNATIVAMENTE, D'ACQUA E SOLUZIONE DETERGENTE AD ARIA (LA SOLUZIONE DEVE ESSERE CAMBIATA DOPO OGNI USO);
- STACCARE LO STRUMENTO DALLA FONTE LUMINOSA;
- PASSARE SULLA SEZIONE FLESSIBILE UN TAMPONE DI GARZA INUMIDITO DI SOLUZIONE DETERGENTE ENZIMATICA ALLA CORRETTA DILUIZIONE PER TOGLIERE I PRIMI RESIDUI GROSSOLANI;
- DECONTAMINAZIONE IN SOLUZIONE DISINFETTANTE DELLO STRUMENTO E DEGLI ACCESSORI DISCONNESSI (SECONDO LE INDICAZIONI DELLA SCHEDA TECNICA DELLO STRUMENTO E/O DEL PRODOTTO UTILIZZATO);
- RISCIACQUARE;

VERIFICA DELLA TENUTA DEGLI STRUMENTI

DETERSIONE

- IMMERGERE LO STRUMENTO E LE SUE PARTI SMONTABILI IN ACQUA E DETERGENTE;
- RIMUOVERE LE PARTI REMOVIBILI;
- LAVARE IL CANALE BIOPTICO DELLO STRUMENTO AIUTANDOSI CON UNA SIRINGA DA ALMENO 50 CC COLLEGANDOLO EVENTUALMENTE AGLI APPOSITI RACCORDI;
- PULIRE CON UNO SPAZZOLINO LE APERTURE DEI CANALI D'ASPIRAZIONE, BIOPTICO ED ARIA/ACQUA;



CIO – COMITATO PER LA LOTTA ALLE INFEZIONI OSPEDALIERE

ISTRUZIONE OPERATIVA PER IL REPROCESSING DEGLI ENDOSCOPI/ISTEROSCOPI

- SPAZZOLARE INTERNAMENTE (ALMENO TRE PASSAGGI) OGNI CANALE CON SPAZZOLA D'APPROPRIATA LUNGHEZZA E DIAMETRO;
- RISCIAQUARE LA PARTE DISTALE DELLA SPAZZOLA AD OGNI PASSAGGIO;
- SPAZZOLARE LA PUNTA DISTALE DELL' ENDOSCOPIO;

NB: PARTICOLARE ATTENZIONE DEVE ESSERE POSTA AL LAVAGGIO DEL DUODENOSCOPIO;

- PASSARE CON UNA GARZA IMBEVUTA DI DETERGENTE ENZIMATICO (DILUITO COME PREVISTO IN ETICHETTA) ALL'ESTERNO DELLO STRUMENTO PER RIMUOVERE I RESIDUI ORGANICI, INIZIANDO DALL' IMPUGNATURA E PROSEGUENDO VERSO LA PARTE DISTALE;
- RISCIAQUARE ABBONDANTEMENTE TUTTI I CANALI ALLA FINE DELLA PULIZIA PER RIMUOVERE OGNI TRACCIA DI DETERGENTE;
- ESEGUIRE UNA SECONDA DETERSIONE ED UN SECONDO RISCIAQUO MANUALE, LADDOVE NON SIA POSSIBILE UNA DETERSIONE AUTOMATICA CON MACCHINA LAVAENDOSCOPI;

N.B. : RISPETTARE I TEMPI E I MODI DELLA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

ASCIUGATURA

UTILIZZARE, ESCLUSIVAMENTE, PANNI E/O TELI PULITI PRIVI DI FIBRE;



CIO – COMITATO PER LA LOTTA ALLE INFEZIONI OSPEDALIERE

ISTRUZIONE OPERATIVA PER IL REPROCESSING DEGLI ENDOSCOPI/ISTEROSCOPI

PRECISAZIONI

- A) IL RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL' U.O. DOVRA' VALUTARE SE PROCEDERE CON LA DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO (EVENTUALE PRESENZA DI SPORE RESIDUE) O SE PROCEDERE CON LA STERILIZZAZIONE (ASSENZA DI SPORE); LE DUE MODALITA', PRECEDENTEMENTE DESCRITTE, POSSONO ESSERE EFFETTUATE, ANCHE, CON L'USO DELL' ACIDO PERACETICO.
- B) BISOGNA, ALTRESI', VALUTARE LA COMPATIBILITA' DEL MATERIALE CON IL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE.
- C) RISPETTARE I TEMPI ED I MODI DESCRITTI NELLA SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO ED ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE DELLA MACCHINA (ANCHE PER LA MANUTENZIONE);
- D) ESEGUIRE I CONTROLLI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI PER LA VERIFICA DELL' AVVENUTA STERILIZZAZIONE/DISINFEZIONE;

EFFETTUARE L'ALCOLIZZAZIONE DEI CANALI DELL'ENDOSCOPIO

STOCCAGGIO DELL' ENDOSCOPIO

- PRELEVARE LO STRUMENTO CON GUANTI STERILI;
- CONFEZIONARE IN UN TELINO STERILE E CHIUDERE CON UN CEROTTO;
- RIPORRE LO STRUMENTO IN ARMADIO "PULITO";



CIO – COMITATO PER LA LOTTA ALLE INFEZIONI OSPEDALIERE

ISTRUZIONE OPERATIVA PER IL REPROCESSING DEGLI ENDOSCOPI/ISTEROSCOPI

TRACCIABILITA' DEL REPROCESSING

- CHI HA ESEGUITO LA PROCEDURA, QUANDO, DOVE, COME, SCADENZA DEL PRODOTTO UTILIZZATO, NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'ENDOSCOPIO, LUOGO DI STOCCAGGIO, PAZIENTE PER IL QUALE E' STATO USATO LO STRUMENTO;
- USO DI UN REGISTRO PER LA RACCOLTA DEI DATI;

IMPORTANTE: GLI ACCESSORI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A DECONTAMINAZIONE (IMMERSIONE IN SOLUZIONE DISINFETTANTE), DETERSIONE ESTERNAMENTE E INTERNAMENTE, RISCIACQUO, ASCIUGATURA, CONFEZIONAMENTO, STERILIZZAZIONE, STOCCAGGIO;

Fonti bibliografiche:

- Dossier 133-2006, Agenzia Sanitaria Regione Emilia Romagna –Reprocessing degli endoscopi indicazioni operative;
- Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Centrale Asl Viterbo PROCEDURA PER IL RICONDIZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE ENDOSCOPICHE AQ.03Rev. 01/2004;
- Azienda Ospedaliera S. Camillo - Forlanini – Roma - U.O. Igiene Ospedaliera - Procedure per la pulizia, disinfezione e la sterilizzazione degli endoscopi 04.10.2008.